

かぜ・花粉対策に

そ う  
**爽ALマスク**®

**立体タイプ**

呼吸がラク/話しやすい



**3層フィルター**が  
花粉やホコリをしっかりガード!



第一三共ヘルスケア

「ふつうサイズ」**5枚入**  
マスクは感染を完全に防ぐものではありません。

かせ・花粉対策に

# 爽ALマスク®

開封口

## 立体タイプ

「ふつうサイズ」5枚入

### ■ 特 徴

#### 1. 快適な立体タイプ

立体構造なので顔にぴったりフィットし、マスクの周りにすきまを作らず、花粉やほこりを防ぎます。口元にゆとりがあるため息苦しさが少なく、かけたまま会話もしやすいうえ、口紅の落ちにくい形状です。

#### 2. 微粒子の侵入を防ぐ3層フィルター


2層の不織布と静電フィルターの3層構造が、花粉やほこり、ウイルス・細菌を含んだ飛沫の侵入を防ぎ、また咳やくしゃみの飛散も阻止します。

#### 3. 耳が痛くならないソフトタイプの耳ひも

長時間かけても耳が痛くならないよう、やわらかな素材を採用しています。

### ■ 使用方法

① マスクの上下を確認し、矢印の位置をもってマスクを左右に開きます。

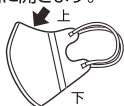

② 耳ひもをひっぱって耳にかけます。



③ 顔にぴったりフィットするよう位置を調節して下さい。



### ■ 使用上の注意

●本品は有害な粉塵・ガスの発生する場所でのご使用はできません。●万一、使用中にかぶれ、かゆみなどがあらわれた場合は直ちに使用を中止し、医師又は薬剤師にご相談下さい。●臭いで気分が悪くなった場合は、使用を中止して下さい。●乳幼児の手の届かない所に保管して下さい。●本品は1回使いきりタイプです。洗濯による再使用はできません。衛生的にご使用いただくために、少なくとも1日1回取り替えるようにして下さい。●開封後はきちんと封をして清潔に保って下さい。●本品でウイルス飛沫・細菌・花粉を100%阻止できるわけではありません。●直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。●火気のそばでのご使用はおやめ下さい。

(一社)日本衛生材料工業連合会自主基準による表示

品名	マスク(商品名 爽ALマスク立体タイプ)
対象	風邪・花粉・ほこり等
素材	本体: ポリプロピレン不織布、 静電フィルター 耳ひも部: ウーリーゴム
入数	5枚
販売者名	第一三共ヘルスケア株式会社 東京都中央区日本橋3-14-10 お問い合わせ先 お客様相談室 03(5205)8331 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)
包装材	ポリプロピレン

供給元 阿蘇製薬株式会社

熊本県菊池郡菊陽町津久礼91-1

®登録商標

MADE IN CHINA



製造番号

